

 Avizor Saline 350ml	 Avizor Saline 350ml	 Avizor Saline 350ml
HUUHTELU- JA SÄILYTYSNESTE KAIKENTYYPISILLE PILOLINSSEILLE. EHKÄISEE KALKKIKERTYMIEN MUODOSTUMISTA. SOPII MYÖS ENTSYMAATTISTEN TABLETTIEN LIUOTTAMISEEN.	LÖSMEDEL FÖR SKÖLJNIG OCH FÖRVARING AV ALL TYP AV KONTAKTLINSER. FÖRHINDRAR ATT DET BILDAS KALKAVLAGRINGAR. ÄVEN FÖR UPPLÖSNING AV ENZYMATISKA TABLETTER.	RINSING AND STORING SOLUTION FOR ALL TYPE OF CONTACT LENSES. PREVENTS FORMATION OF CALCIUM DEPOSITS. ALSO, FOR DISSOLVING ENZYMATIC TABLETS.
KÄYTTÖOHJEET	BRUKSANVISNING	INSTRUCTIONS FOR USE
Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla ennen linssien käsittelyä.	Tvätta händerna grundligt innan du hanterar linserna.	Before handling your lenses, wash your hands.
Huuhtelu: Puhdistamisen jälkeen ja aina tarvittaessa aseta linssi kämmenelle ja huuhtele se huolellisesti Avizor Saline -nesteellä hieroen linssiä sormenpäillä.	Sköljning: Efter rengöringen, och om det är nödvändigt, placera linsen på handflatan och skölj noga med Avizor Saline -vätska.	Rinsing: After the cleaning process, and if necessary, place the lens on the palm of your hand and rinse thoroughly with Avizor Saline -solution.
Liuota entsyymaattiset tabletit nesteellä tablettien käyttöohjeen mukaan.	För att lösa upp den enzymatiska tabletten använd lösningen enligt bruksanvisningen för användning av tabletter.	To dissolve the enzymatic tablet, use the solution according to instructions for use of tablets.
VAROITUKSET	FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	PRECAUTIONS
Neste tulee käyttää 60 päivän kuluessa pullon avaamisesta.	Då flaskan öppnats ska innehållet användas inom 60 dagar.	Once opened, the bottle should not be used after 60 days.
Pidä pullo käytön jälkeen hyvin suljettuna.	Se till att flaskan är ordentligt stängd efter användning.	Maintain the bottle well closed after use.
Älä käytä valmistetta, jos sen turvasinetti puuttuu tai on rikottu.	Produkten bör inte användas om försegling inte finns eller är brutit.	Do not use the product if the safety seal is missing or broken.
Piilolinsejä saa säilyttää enintään 30 päivää suljetussa piilolinssikotelossa.	Linserna kan förvaras i upp till 30 dagar i stängd lins-etui.	You may store your lenses up to 30 days in the closed lens case
Nestettä ei saa niellä, ja se on pidettävä lasten ulottumattomissa.	Vätskan för inte förtäras och bör förvaras utom barns räckhåll.	Do not ingest the solution and keep away from children's reach.
Säilytä huoneenlämmössä.	Förvaras vid rumstemperatur.	Keep at room temperature.
Älä päästä tippakärkeä koskettamaan mitään pintoja likaantumisen välttämiseksi.	Rör inte och undvik att smutsa ner toppen på flaskan.	Do not allow the dropper to come into contact with any surface to avoid contamination
Jos havaitsit silmien ärtymistä, ota yhteyttä asiantuntijaan.	Om irritation skulle uppstå, rådfråga omedelbart din kontaktlinsspecialist.	In case of irritation, consult your contact lens specialist.
Muista aina kertoa lääkärille, että käytät piilolinsejä, ennen kuin käytät mitään silmlääkettä.	Innan användning av någon slags ögonmedicin, bör du informera din läkare om att du använder linser.	Before using any ophthalmic medicine, inform your doctor you are a contact lens user.
Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen jollekin sen aineosalle.	Produkten bör inte användas om du är allergisk mot någon av systemets komponenter.	Do not use if you are allergic to any of the components.
Älä koskaan käytä vesijohtovettä piilolasikotelon puhdistamiseen.	Använd aldrig kranvatten för att skölja linshållaren eller linserna.	Never use tap water to rinse your lenses or lens case.
Älä käytä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.	Använd inte efter utgångsdatum.	Do not use after the expiration date.
KOOSTUMUS	INNEHÅLL	COMPOSITION
Isotoninen, puskuroitu ja steriili 0,00005 % poliheksanidia sisältävä liuos.	Buffrad, isoton och steril lösning med polyhexanid 0,00005 %	Polihexanide 0,00005 % in a buffered, isotonic and sterile solution.