


novalens

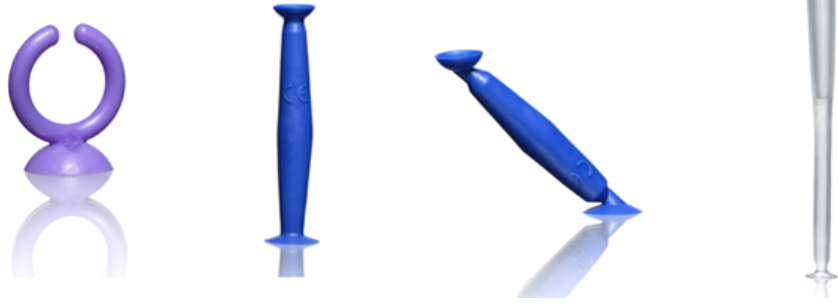

PIIOLINSSIEN KÄSITTELYÄ HELPOTTAVAT VÄLINEET

*ENNEN KÄYTTÖÄ:
HUUHELE PIILOLINSSIEN SÄILYTYSNESTEELLÄ TAI SUOLALIUKSELLA.*

*JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN:
HIERO PEUKALON JA ETUSORMEN VÄLISSÄ MIEDOLLA PESUNESTEELLÄ MUUTAMAN SEKUNNIN AJAN. HUUHELE SEN JÄLKEEN HUOLELLISESTI PIILOLINSSINESTEELLÄ.*

SUOSITELTU VAIHTOVÄLI: 6KK

LCS DI -imukuppi (vino)



Apuväline erityisesti piilolinssien silmään laittamiseen. Kätevä ergonominen muotoilu mahdollistaa turvallisen käsittelyn, vähentäen linssien vaurioitumisen riskiä.

LCS DS -imukuppi (suora)



Erityisesti skleraalinssien, poistamiseen silmästä. Imutoiminto mahdollistaa linssin turvallisen ja hallitun irrottamisen ilman, että linssiin tai silmään kohdistuu liikaa painetta.

Sormus



Sormus skleraalistien ja hybridilinssien silmäänlaittoon. Piilolinssien käsittelyyn esim. henkilöille, joilla on pitkät kynnet tai rajoittunut hienomotoriikka.



Piilolinssipihdit

Muoviset pihdit, jotka pehmeiden silikonipäiden ansiosta soveltuvat hyvin kaikenlaisten piilolinssien käsittelyyn.



LCS SL -imukuppi (scleral)

Turvallinen ja tehokas imukuppityyppinen laite, jolla voi sekä asettaa että poistaa linssin silmästä. Suurempi imupinta on erityisesti mitoitettu skleraalisille piilolinssille.



LCS Scleral Case + SL imukuppi

Erikoismuotoiltu kotelo, joka on suunniteltu suurikokoisille skleraalisille linssille. Kotelo tarjoaa riittävän tilan ja suojan linssien muodolle.

novalens



PIIOLINSSIEN KÄSITTELYÄ HELPOTTAVAT VÄLINEET


ENNEN KÄYTTÖÄ: HUUHTELE SOVELTUVALLA PIILOLINSSINESTEELLÄ TAI SUOLALIUKSELLA.

JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN: HIERO PEUKALON JA ETUSORMEN VÄLISSÄ MIEDOLLA PESUNESTEELLÄ MUUTAMAN SEKUNNIN AJAN. HUUHTELE SEN JÄLKEEN HUOLELLISESTI PIILOLINSSINESTEELLÄ.

SUOSITELTU VAIHTOVÄLI: 6KK



DI
double
inclined
(vino)

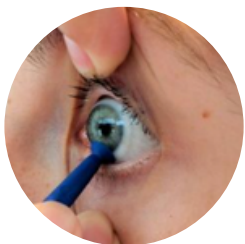

DS
double
straight
(suora)



SL Plunger
(scleral lens)



Handling Ring

Hybridi-, RGP-, tai Ortho-K -linssin poisto apuvälineellä

- Pidä DI- tai DS-imutyökalu peukalon ja etusormen välissä ja katso itseäsi peilistä.
- Aseta keskisormi alaluomen vapaan reunan alle ja toisen käden etusormi yläluomen vapaalle reunalle.
- **Ortokeratologia- ja korneaaliset RPG-linssit:** Aseta imutyökalu linssin keskelle ja irrota linssi varovasti.
- **Hybridilinssit:** Aseta imutyökalu linssin pehmeän osan alareunaan ja nosta ylöspäin. Linssi irtoaa ensin alareunasta, minkä jälkeen koko linssi irtoaa itsestään.
- **Skleraaliset linssit:** Aseta imutyökalu linssin alareunaan ja vedä hellävaraisesti ylöspäin. Linssi menettää tartuntansa ensin alareunasta, minkä jälkeen se irtoaa kokonaan.
- Tämän jälkeen voit poimia linssin peukalolla ja etusormella.

Skleraalisen linssin silmänlaitto kaksipäisellä apuvälineellä

- Aseta imutyökalu puhelimesi ruudulle tai peilipinnalle.
- Aseta linssi suuremman kupin päälle ja pidä linssistä kiinni kun täytät sen reunaan myöten nesteellä.
- Levitä alaluomea keskisormella tai etusormella ja pidä toisella kädellä yläluomi auki. Pidä sormet ripsien tyvessä estääksesi räpyttelyn.
- Vie silmäsi varovasti linssiä kohti, jolloin linssi asettuu kevyesti sarveiskalvon päälle.
- Vapauta luomet hellästi ja räpyttele muutaman kerran poistaaksesi ylimääräiset kyynelät.

Skleraalisen tai hybridi-linssin silmänlaitto sormuksen avulla

- Aseta käsittelysormus sormeesi ja linssi sen keskelle.
- Täytä linssi mahdollisimman täyteen nesteellä.
- Aseta keskisormi alaluomen reunan alapuolelle ja toisen käden etusormi yläluomen reunalle.
- Vie linssi varovasti silmää kohti ja aseta se hellävaraisesti sarveiskalvon päälle (tunnet ensin nesteen, mutta tuo linssiä lähemmäksi, kunnes tunnet linssin kosketuksen).
- Vapauta luomet varovasti ja räpyttele muutaman kerran poistaaksesi ylimääräiset kyynelät.